

**Shandon Immu-Mount™**  
**Aqueous Non-fluorescing Mounting Medium**



**Thermo**  
ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology USA  
Clinical Diagnostics  
171 Industry Drive  
Pittsburgh, PA 15275, USA  
Tel: 1-800-547-7429  
+1 412 788 1133  
Fax: +1 412 788 1138  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

Anatomical Pathology International  
Clinical Diagnostics  
93-96 Chadwick Road  
Astmoor, Runcorn  
Cheshire, WA7 1PR, UK  
Tel: +44 (0) 1928 566611  
Fax: +44 (0) 1928 565845  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

**Shandon Immu-Mount™** er et vandbaseret monteringsmedium specielt fremstillet til brug ved frysesnit, immunperoxidaseteknikker og immunfluorescenspræparater.

Protokoller med AEC og chloronaphtol giver slutprodukter, der er opløselige i alkohol og organiske opløsningsmidler. Præparater fremstillet med disse metoder bør have dækglassene monteret med et vandbaseret monteringsmedium, f.eks. Immu-Mount. Med den rette teknik falmer farven ikke i mindst et år, når der er anvendt Immu-Mount.

Immunfluorescens teknikker kræver et monteringsmedium, der ikke påvirker prøveresultaterne. Når Immu-Mount anvendes sammen med filtre, der er velegnede til fluorescein- og rhodaminkonjugater, udviser det ikke baggrundsfluorescens. Desuden er der ikke risiko for at dæmpe fluorescensafgivelsen.

## **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

### **TIL BRUG FOR IN VITRO-DIAGNOSTIK.**

Der bør altid udvises rimelig omhu ved brug af laboratoriereagenser. Bør kun bruges i velventileret lokale. Opbevares ved rumtemperatur. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

---

---

## **ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**

Se produktdatablade vedr. advarsler og forholdsregler, samt relevante R & S-sætninger. Følgende symboler er anvendt på produktmærkater og emballage:



Definitioner findes bag på heftet

---

---

## BRUGSANVISNING

1. Tag hættten af og prik hul i dispenserens tud.
2. Efter skylning i saltvand rystes overskydende væske af objektglasset, og bagsiden aftørres.
3. Vend flasken på hovedet for at fjerne bobler fra tuden. Det sikrer, at væsken løber kontinuerligt ud. Ryst **IKKE** flasken.
4. Klem den første dråbe ud på et papirhåndklæde for at sikre, at der ikke er luft i tuden.
5. Uden at tage trykket af flaskens sider afsættes der flere dråber monteringsmedium på objektglasset.
6. Sæt forsigtigt dækglasset på.
7. Immu-Mount kan påføres dækglasset i stedet for objektglasset: Før tuden langs kanten af dækglasset, så der afsættes en sammenhængende stribe monteringsmedium. Stil objektglasset vinkelret på dækglasset og sænk langsomt objektglasset, til dækglasset sidder fast på det.
8. Brug en tang til at fjerne eventuelle bobler under dækglassets hjørner. Hvis det ikke kan lade sig gøre: Læg præparatet i saltvand, tag dækglasset af og gentag hele proceduren.
9. Præparatet kan straks undersøges i mikroskop, men pas på, at dækglasset ikke flytter sig, før præparatet er tørt.
10. Giv præparaterne tilstrækkelig tid til at tørre, inden de lægges til opbevaring.
11. For at bevare størst mulig fluorescens skal færdige præparater opbevares et koldt (4° C), mørkt sted.

