



KERTAKÄYTTÖISEN CYTOFUNNEL® -NÄYTESUPPILON KÄYTTÖOHJEET

Tarkoitettu käytettäväksi Cytospin® -sentrifugin kanssa (katso kuva käyttöoppaan etusivulla)

Cytoclip objektilasin pidikkeen lataaminen käytettäessä kertakäyttöistä Cytofunnel-suppiloa:

- 1 Kiinnitä objektilasi (a). Varmista, että objektilasi on oikein päin, eli himmennetyn merkin pää on ylöspäin ja himmennetty puoli Cytofunnel-suppiloa kohden.
- 2 Kiinnitä kertakäyttöinen Cytofunnel-suppilo (b)
- 3 Vedä jousi (c) ylös ja paina se kiinni kahteen pitokoukkuun, jotta suppilo pysyy paikallaan

Huom!

- 1 Kertakäyttöisissä Cytofunnel-suppiloissa on kiinteät suodattimet Cytoclip-objektilasin täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.

Cytospin-roottorin lataaminen: Poista kansi ja aseta korkeintaan 12 koottua Cytoclip objektilasin pidikettä aukkoihin. Varmista, että kootut Cytoclip-pidikkeet ovat kunnolla paikallaan roottorissa ja pysyvät eteenpäin kaltevassa asennossa.

Varmista, että Cytoclip-pidikkeet ovat tasaisin välein roottorissa, jotta roottori on tasapainossa. Voit esimerkiksi asettaa Cytoclip-pidikkeet kohtiin 1, 5 ja 9, jos käytössä on vain kolme Cytoclip-pidikettä (d), tai kohtiin 1, 4, 7 ja 10, jos käytössä on vain 4 pidikettä (e).

Huom!

- 1 Kun Cytoclip objektilasin pidike asetetaan roottoriin objektipöydälle, suppilo pysyy sopivassa kulmassa siten, että näyte ei kosketa suodatinpaperia. Kun Cytospin-sentrifugi käynnistetään, Cytoclip objektilasin pidike heilahtaa pystysuoraan asentoon, jolloin näyte voidaan sentrifugoida lasille.

Varmista näytteitä ladatessasi, että Cytoclip-kokoonpano on lepoasennossa (kallellaan) ja täytä varovasti standardimallinen solusuppilo pipetin avulla solususpensiolla, jonka määrä on korkeintaan 0,1 - 0,5 ml.

Huom!

- 1 Älä täytä Cytofunnel-suppiloita solususpensiolla yli alla mainittujen määrien:

| | |
|--|------------------------------|
| Yksi Cytofunnel-suppilo (valkoinen suodatin) | enintään 0,5 ml maximum |
| Yksi Cytofunnel-suppilo (ruskea suodatin) | 0,4 ml |
| Cytofunnel-kaksoissuppilo | 0,25 ml kummallekin puolelle |
- 2 Suppilot voi peittää kansilla läikkymisen estämiseksi

Aseta roottorin kansi takaisin paikalleen ja paina keskinappulasta alaspäin siten, että se lukittuu kiinni.

Aseta roottori Cytospin-sentrifugiin ja käynnistä ohjelma.

Objektilasi irrotetaan Cytoclip-pidikkeestä pitämällä objektilasin pidikkeestä tiukasti kiinni ja vetämällä jouta objektilasia vasten siten, että se irtaooa koukuista. Työnnä jouta koukuista pois päin ja anna näytesuppilon ponnahtaa irti pidikkeestä. Poista objektilasi ja kiinnitä asianmukaisella tavalla.

Heitä pois kertakäyttöinen Cytofunnel-suppilo suoraan asianmukaiseen jäteastiaan käytetyistä näytteistä ja materiaaleista riippuen oman laboratiosi käytännön mukaisesti.



KERTAKÄYTTÖINEN - Älä käytä kertakäyttöistä Cytofunnel-suppiloa useammin kuin kerran.



Säilytä käyttämättömät Cytofunnel-suppilot puhtaassa ja kuivassa paikassa.

NOUDATA HYVÄÄ LABORATORIOKÄYTÄNTÖÄ MAHDOLLISESTI VAARALLISTEN MATERIAALIEN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

Cytospin-sentrifugin täydelliset käyttöohjeet löytyvät Käyttöoppaasta.