



# CYTOFUNNEL® MATERIALKAMMARE FÖR ENGÅNGSBRUK

## BRUKSANVISNING

För användning tillsammans med Cytospin® cytocentrifug.

(Se figurer i början av handboken.)

### För att ladda en Cytoclip preparathållare med en Cytotratt för engångsbruk:

- 1 Montera objektglaset (a). Kontrollera att preparatglaset är korrekt orienterat, dvs. att änden med den frostade etiketten är vänd uppåt med den frostade sidan vänd mot Cytotratten
- 2 Montera en Cytofunnel för engångsbruk (b)
- 3 Fäll upp bygeln (c) och tryck in den i de två hakarna för att hålla rotorn på plats

### Anmärkning

- 1 Cytofunnels är försedda med förmonterade filterkort för att förenkla laddning och urtagning av Cytoclip preparathållare och är avsedda att endast användas vid ett tillfälle.

**För att ladda miljörotorn**, ta av locket och placera upp till 12 monterade Cytoclip preparathållare i facken. Kontrollera att de monterade preparathållarna är korrekt placerade i den slutna preparatkammaren och att de lutar framåt.

**Se till att preparathållarna är jämnt fördelade i miljörotorn**, detta för att säkerställa att den slutna preparatkammaren är rätt balanserad. Exempelvis, placera dessa i position 1, 5 och 9 (d). Fyra preparathållare placeras på motsvarande sätt i position 1, 4, 7 och 10(e).

### Anmärkning

- 1 När en Cytoclip preparathållare placeras i stödplattan i miljörotorn hålls materialkammaren i en lämplig vinkel så att provet inte kommer i kontakt med filterpapperet. När Cytospin startas svänger preparathållarna till upprätt läge så att proverna kan centrifugeras och deponeras på objektglaset.

**För att ladda proverna**, kontrollera att Cytoclip-enheten är i vila (vinklad position) och fyll standard-Cytofunnels med pipett med mellan 0,1 och 0,5 ml (max.) cellsuspension.

### Anmärkning

- 1 Fyll inte på Cytotrattarna med större volymer än följande:
 

Enkel Cytotratt (brunt filterkort)	Max. 0,5 ml
Single Cytofunnel (brown filter card)	0,4 ml
Dubbel Cytotratt	0,25 ml på varje sida
- 2 Lock kan placeras på trattarna för att undvika spill

**Sätt på locket till miljörotorn** och tryck ned låsspärren som sitter i lockets mitt.

**Placera miljörotorn i Cytospin och starta programmet.**

**För att avlägsna objektglaset från preparathållaren**, håll hållaren med ett fast grepp och tryck bygeln inåt för att lossa den från hakarna. Fäll ut bygeln från hakarna och låt materialkammaren snäppa loss från hållaren. Ta ur objektglaset och fixera på lämpligt sätt.

**Kassera Cytofunneln omedelbart** enligt gällande bestämmelser för de prover och material som används.



**ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK - Använd inte Cytofunnels mer än en gång.**

**Förvara oanvända Cytotrattar på en ren och torr plats före användning.**

**VAR NOGA MED ATT ALLTID TILLÄMPA GOD LABORATORIEPRAXIS NÄR POTENTIELLT FARLIGA MATERIAL HANTERAS**

Se användarhandboken till Cytospin för en fullständig beskrivning av hur cytocentrifugen skall användas.