

Thermo

ELECTRON CORPORATION

BRUKSANVISNING

SHANDON CYTOCLIP™ PREPARATHÅLLARE TPX-PROVKAMMARE FILTERKORT

För användning med Shandon Cytospin® cytocentrifug

A78310253

Utgåva 3

Anatomical Pathology

93 - 96 Chadwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PR, UK

Tel: +44 (0) 1928 566611;

Fax: +44 (0) 1928 565845;

www.thermo.com/shandon

171 Industry Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, PA 15275, U.S.A.

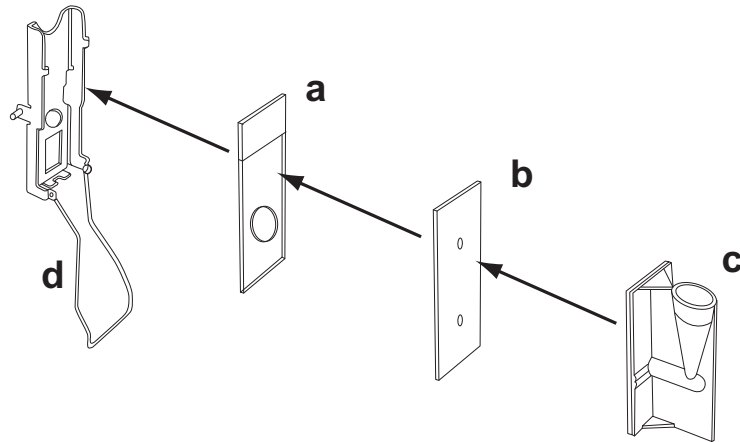
Tel: +1 412 788 1133;

Fax: +1 412 788 1138;

www.thermo.com/shandon

SHANDON CYTOSPIN® BRUKSANVISNING FÖRTILLBEHÖR

Shandon preparathållare, TPX-kammare, filterkort

För användning med Shandon Cytospin® cytocentrifug

För att ladda Shandon Cytoclip preparathållare med en återanvändbar provkammare och ett filterkort:

- 1 APTERA objektglaset (a).
- 2 APTERA filterkortet (b).
- 3 APTERA den återanvändbara provkammaren (c).
- 4 För upp låsbygeln (d) och tryck in den mellan de två hakarna för att hålla kammaren på plats.
- 5 Kontrollera att provkammaren och filterkortet är korrekt inriktade.

Anm: För att säkerställa att provet inte kommer i kontakt med objektglaset före centrifugeringen, ladda alltid provet efter att provkammaren har apterats i miljörotorn.

För detaljerade anvisningar om användningen av Shandon Cytospin, om laddning och balansering av miljörotorn och om laddning av prover, se användarhandboken till Shandon Cytospin.

För att lossa objektglaset från preparathållaren: håll preparathållaren med ett fast grepp och tryck låsbygeln mot objektglaset för att frigöra den från hakarna. För bort bygeln från hakarna och lossa provkammaren från hållaren. Avlägsna objektglaset.

Förvara Shandon preparathållare, TPX-kammare och filterkort på en ren och torr plats efter användning.



VAR NOGA MED ATT ALLTID TILLÄMPA GOD LABORATORIEPRAXIS NÄR POTENTIELLT FARLIGA MATERIAL HANTERAS.



FILTERKORTEN ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ENGÅNGSBRUK - Använd dem inte mer än en gång.


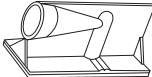
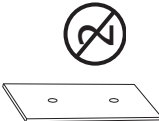
Thermo Electron Corporation makes every endeavour to ensure that the information contained in its support documentation is correct and clearly stated but does not accept responsibility for any errors or omissions. The development of Thermo products and services is continuous. Make sure that any published information that you use for reference is up to date and relates to the status of the product. If necessary, check with Thermo or your local Thermo representative.

All information contained in this manual is proprietary and confidential, and the exclusive property of Thermo Electron Corporation. This manual is protected by copyright and any reproduction is prohibited. This manual is for use only by the individuals to which it has been made available by Thermo Electron Corporation.

© 2002-2004 Thermo Electron Corporation. All rights reserved.

This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of Thermo

Tabell 1. Rengöring och dekontaminering

Del	Intervall	Instruktioner
Cytoplip preparathållare 	Dagligen	<p>Kontrollera: Kontrollera att preparathållaren inte är skadad.</p> <p>Dekontaminera: Autoklavera vid 121 °C under 15 minuter</p> <p>Som alternativ kan preparathållaren desinficeras genom blötläggning i en 10-procentig lösning av ett kommersiellt blekmedel i vatten under minst en timme.</p> <p>Rengör: Skölj i rent vatten och torka med varmluft före användning.</p> <p>Anmärkning: För preparathållare (artikelnummer 5991052M), snäpp loss fjädern. För fjäderbelastad preparathållare (artikelnummer 5991017M), vrid tryckfrigöringsskruven moturs så långt det går för att frigöra fjädertrycket.</p>
Återanvändbar materialkammare 	Efter användning	<p>Kontrollera: Kontrollera att kammaren inte är skadad</p> <p>Dekontaminera: Autoklavera vid 121 °C under 15 minuter. Autoklavera INTE plastlocket.</p> <p>Anmärkning: Missfärgning på grund av upprepad autoklavering inverkar inte menligt på materialkammarens funktion.</p> <p>Som alternativ kan materialkammaren desinficeras genom blötläggning i en 10-procentig lösning av ett kommersiellt blekmedel i vatten under minst en timme.</p> <p>Rengör: Använd en bomullstopp och hett tvålatten för att rengöra utloppsporten och tratten. Skölj i rent vatten, skaka av överflödigt vatten och torka.</p> <p>Använd INTE en stålborste.</p>
Filterkorts 	Efter användning	<p>Dekontaminera: Kassera i ett fenolbaserat desinficeringsmedel, eller Autoklavera vid 121 °C under 15 minuter.</p> <p>Som alternativ kan filterkort blötläggas i en 10-procentig lösning av ett kommersiellt blekmedel i vatten under minst en timme.</p> <p>Kassera enligt gällande bestämmelser för de prover och material som används.</p>